



KULTÄCKET®
SAFIR

BRUKSANVISNING

Våra tyngdtäcken klassas som medicintekniska hjälpmedel och lindrar sömnproblem som uppstått av olika anledningar. Tyngdtäcken används vid varierande diagnoser och problematik. Storlek på våra täcken: stora 150x200 cm och små 110x125 cm.

Bruksanvisningen avser följande artiklar:

Stora	SAFIR	Små	SAFIR
Art.nr 008131160	4 kg	Art.nr 008131166	2,3 kg
Art.nr 008131161	6 kg	Art.nr 008131167	3,7 kg
Art.nr 008131162	8 kg	Art.nr 008131168	5,0 kg
Art.nr 008131163	10 kg		
Art.nr 008131164	12 kg		
Art.nr 008131165	14 kg		

NOVISTA

SÅ HÄR SKÖTER DU DITT TYNGDTÄCKE

Novistas Kultäcke® SAFIR tvättas i en vanlig hushållstvättmaskin. Täcket är delbart med en längsgående dragkedja som underlättar vid både tvätt och torkning. Dela alltid täcket (gäller ej små täcken) och tvätta delarna separat, oavsett täckets vikt. Kultäcket® SAFIR ska alltid tvättas i tvättpåse. Täcket ska inte tvättas med färgade textilier. Vid borttagning av fläckar kan klorin användas. Klorin påverkar inte tyg eller fibrer i våra tyngdtäcken. Använd skonsam centrifugering med lågt varvantal (400 eller 600). Täcket kan inte torktumlas. Täcket skall alltid sträckas ut i längd och bredd efter tvätt*.

TÄNK PÅ ATT...

Kultäcket® SAFIR upplevs olika beroende på vilken sida man vänder mot kroppen eftersom den ena sidan är vadderad.

Använd alltid täcket med påslakan eller våra hygienöverdrag.

Noppor på polyestertyg är ofrånkomligt. Det påverkar inte tyngdtäckets funktion, men kan ibland uppfattas störande. Använd gärna en noppborttagare efter tvätt.

** Täcket krymper inte och ska ha sitt ursprungsmått efter tvätt och utsträckning.*

OBSERVERA

Om du har en nedsatt andningskapacitet ska du rådgöra med din arbetsterapeut innan du börjar använda tyngdtäcket.

Särskild försiktighet skall iakttagas vid användning av tyngdtäcke tillsammans med småbarn. Rådfråga sakkunnig vid osäkerhet.

Gå inte runt med tyngdtäcket på dig. Det finns en risk för att du snubblar pga. tyngden. Lämna aldrig tyngdtäcket liggandes på golv eller andra ytor där snubbelrisk föreligger.

Vid transport av tyngdtäcket skall alltid medföljande bärväska användas.

EFFEKTER AV VÅRA TÄCKEN

Våra tyngdtäcken ökar förmågan att slappna av och förbättrar djupsömnen. De ger ett naturligt energitillskott och ökar kroppsuppfattningen. De ger helt enkelt användaren en förhöjd livskvalitet.



KULTÄCKET® SAFIR

I Kultäcket® Safir utgörs vikten av glaskulor placerade i längsgående kanaler. Kulorna ger ett punktvis tryck som stimulerar kroppens sinnen och aktivt bidrar till en ökad kroppsuppfattning. Ena sidan av täcket är vadderad vilket gör det mjukt och följsamt, samtidigt som det ger en känsla av trygghet och lugn.

SKÖTSELRÅD SAFIR



Kultäcket® Safir är ett CE-märkt medicintekniskt klass 1 hjälpmedel som tillverkas i Europa. Produkten är patenterad av Novista of Sweden AB.

GENERELLA GARANTIVILLKOR

Garantin för Novista of Sweden AB's tyngdtäcken gäller i 2 år eller upp till 20 tvättar, beroende på vad som infaller först. För Novista of Sweden AB's tillbehör gäller 1 års garanti. Garantin gäller ej vid omild behandling eller om skötselråd ej följts. Vid en ev. reklamation hänvisar vi i första hand till din lokala kontaktperson (t ex din förskrivare). Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss, se baksidan för kontaktuppgifter.

HYGIENÖVERDRAGET **ECOVERDE**

Vårt organiska hygienöverdrag Ecoverde är framställt av eukalyptus som uteslutande kommer från hållbara skogsplanteringar.

Materialet är anitallergent och har en naturlig kvalster- och svampbarriär. Hygienöverdraget stretchar fint och ger en mjuk bäddmiljö. Ecoverde har ett naturligt inbyggt flamskydd, dvs utan kemisk behandling. Det är tätt vid läckage men släpper igenom kroppsvärme och fukt. Dragkedjor på tre sidor av överdraget underlättar att stoppa i och ta ur tyngdtäcket. Hygienöverdraget finns tillgängligt i två storlekar, "stor" 150x200 cm (art. nr 008131010) och "liten" 110x125 cm (art. nr 008131012).

Rekommenderad tvättemperatur är 60° men det tål upp till 95°.

SKÖTSELRÅD HYGIENÖVERDRAG



Flamsäkert 

Hygienöverdraget tillverkas i Europa.

OBSERVERA

Observera att risk för kvävning föreligger om överdraget ligger så att användarens luftvägar blockeras.

VI UTBILDAR FÖRSKRIVARE

Är du arbetsterapeut eller förskrivare och verksam i en upphandlad region kan du få kostnadsfri utbildning från våra experter.

Kontakta våra arbetsterapeuter med förfrågan via vår hemsida.

Kontakta oss för mer information.

Novista of Sweden AB
Telefon 0431-49 13 10
info@novista.se

NOVISTA
Kunskap & trygghet

www.novista.se