



Fiberyngdväst™  
**VÄSTEN  
SOM KRAMAR  
DIG**

## BRUKSANVISNING

Fibertyngdvästen används av personer med varierande diagnoser och blir för många en viktig del i en fungerande vardag. Västen används framgångsrikt av stora som små med diagnoser som motorisk oro, autism, ADHD, psykisk ohälsa m fl.

Artikelnr.	Barn strl.	Vikt	Bröstvidd	Midjevidd
008131115	110/116 cl	1.0 kg	52-58 cm	52-55 cm
008131116	122/128 cl	1.5 kg	58-64 cm	55-58 cm
008131117	134/140 cl	2.0 kg	64-70 cm	58-61 cm
008131118	146/152 cl	2.5 kg	70-76 cm	61-64 cm

Artikelnr.	Vuxen strl.	Vikt	Bröstvidd	Midjevidd
008131119	X-small	2.5 kg	76-84 cm	68-80 cm
008131120	Small	3.0 kg	84-92 cm	80-88 cm
008131121	Medium	3.5 kg	94-102 cm	88-96 cm
008131122	Large	4.0 kg	102-110 cm	96-104 cm
008131123	X-large	4.5 kg	110-118 cm	104-112 cm
008131124	XX-large	5.3 kg	118-126 cm	112-120 cm

NOVISTA

## ETT KLÄDSAMT PLAGG

Fibertyngdvästen ser ut som ett vanligt klädsamt plagg som kan användas i skolan, hemma eller på jobbet.



## FIBERTYNGDVÄST® - DETALJER

Fibertyngdvästen är tillverkad i svart tyg med svarta dragkedjor och har en kraftig kardborregördel i midjan.





## FIBERTYNGDVÄSTEN OMSLUTER SOM EN FAST KRAM

Västen omsluter kroppen, likt en fast kram, vilket påverkar kroppens proprioceptiva sinnen så att bäraren upplever ett behagligt lugn och får det lättare att koncentrera sig.

Fibertyngdvästen har en kraftig insydd kardborreförsedd gördel som spänns åt i midjan efter egen önskan. På så sätt regleras känslan av vikt och tryck. Fibertyngdvästen är framtagen i samråd med psykiatriker och stresssterapeuter och klassas som en medicinteknisk produkt. Den drar inte uppmärksamheten till sig eftersom den ser ut som en vanlig väst, vilket uppskattas speciellt bland ungdomar.

### **Fibertyngdvästens effekter**

- Motverkar motorisk oro
- Minskar ångest och stress
- Ökar tryggheten
- Ger stöd vid fokusering
- Förbättrar kroppsuppfattningen

## MATERIAL OCH SKÖTSELRÅD FIBERTYNGDVÄSTEN

Fibertyngdvästen är tillverkad i ett smuts- och fläckavvisande material. Det gör att västen kan torkas av med fuktig trasa och hängas på vädring istället för att tvättas. Är västen så smutsig att det inte finns något annat alternativ än att tvätta, är det viktigt att dragkedjan är öppen och kardborregördeln är helt stängd. Tyngden mot trumman kan medföra att lacken på dragkedjan släpper. Tvätta gärna i tvättpåse. Fibertyngdvästen klarar av tvätt i upp till 60 grader men med hänsyn till miljön rekommenderar vi att västen tvättas i max 40 grader.

Material	Polyester och Polyesterfiber
CE-märkning	Ja
Garanti 2 år*	Ja
Maskintvätt	
Torktumlas ej	
Eftertorkas hängande i rumstemperatur eller ute	Ja

\* Gäller ej omild behandling eller om skötselråd ej följts.

# NOVISTA

Novista of Sweden AB • Johannebergsvägen 6 • SE-312 72 Skummeslövsstrand  
Växel +46 (0)431-49 13 10

[www.novista.se](http://www.novista.se)